
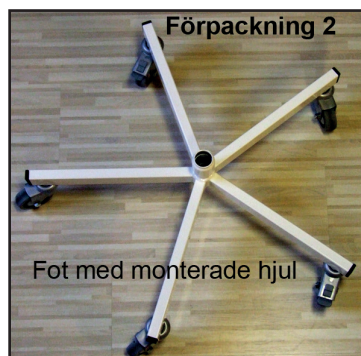


### 3. Monteringsanvisning, sid 1

Apparatstativ Sofie Art nr 1005

#### Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar. Krona, droppstång och tättningsring monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

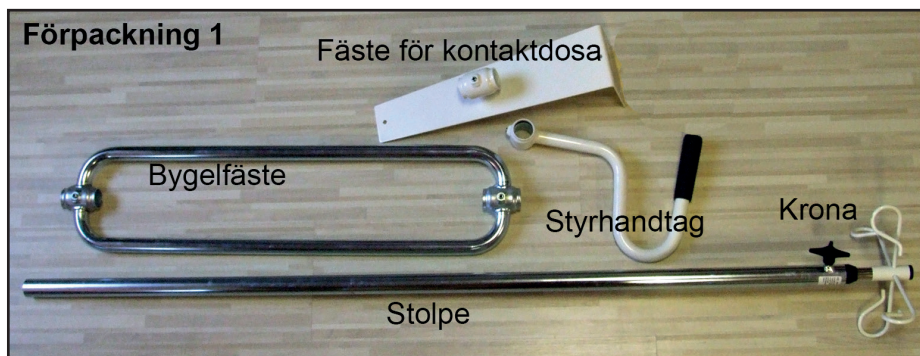

#### Steg 1

Trä bygelfästet på stolpen till hälften.



#### Steg 2

Trä därefter styrhandtagets fästhylsa på stolpen. Skjuv ner stolpen genom bygelfästets nedre fäste.




### 3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)

Apparatstativ Sofie Art nr 1005


#### Steg 4

Trä på kontaktdosefästet med “taket” vänt uppåt.

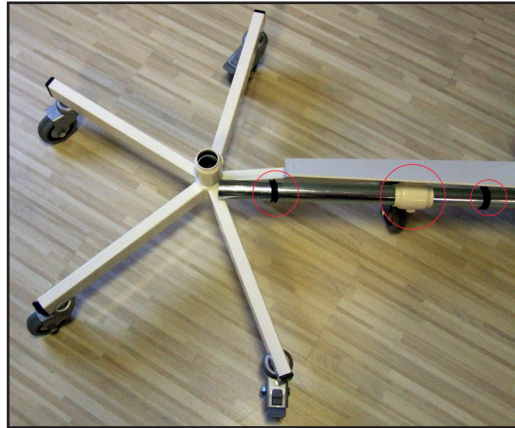

#### Steg 5

Sätt ner stolpen i stativfoten. OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

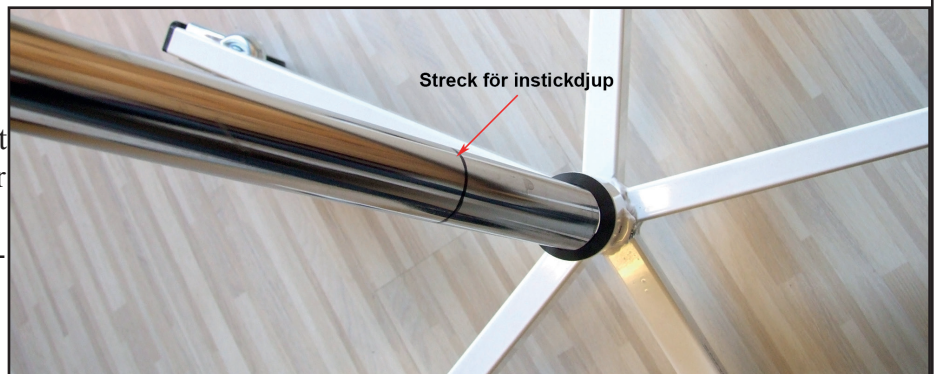

#### Steg 6

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel. Avlägsna den transparenta tejpens. Justera höjderna på bygelfäste, styrhandtag och kontaktdosefäste och dra åt fästhyllsorna för respektive del.

**Klart!**



## 4 Anvisningar för handhavande

### Apparatstativ Sofie Art nr 1005

#### 4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1005 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/-flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets bygelfäste, börja bestyckningen nerifrån med tyngsta enheten längst ner. Fördela flera pumpar växelvis på bygelfästena.

- **Höjjustering droppstång**

Håll i övre stången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

#### 4.2 Max belastningar

**Apparater på bygelfäste: 20 kg**

**Påsar / flaskor på krona: 3 kg**



## 4 Anvisningar för handhavande (forts.)

### Apparatstativ Sofie Art nr 1005

#### 4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
  - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
  - Kontrollera att fästhylsorna för bygelfästet är åtdragna.
  - Kontrollera att fästhylsan för kontaktdosefästet är åtdragen.
  - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
  - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
  - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
  - Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången
- **Rengöring**
  - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

