



JOHLINS

4 Anvisningar för handhavande

Benstativ Åke Art nr 1028

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1028 är ett lyfthjälpmedel avsett att användas i kombination med operationsbord vid ingrepp i ben och armar.



- **Grovinställning av höjd**

Övre stängen justeras genom att öppna låshylsan och lyfta den till lämplig höjd.



- **Inställning av patientläge**

Justering av höjd på ben eller arm sker med operationsbordets egen höjdjustering.



- **Låsning av fot**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.



4.2 Max belastning

Fästöglan får belastas med max 20 kg.



4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Benstativ Åke Art nr 1028

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast på foten.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.

- **Rengöring**
Stativets bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



7. Försäkran om överensstämmelse

Benstativ Åke Art nr 1028

EG-försäkran om överensstämmelse

enligt MDD 2007 / 42 / EG inklusive tillägg och
enligt CE-märkningsdirektivet 93 / 68 / EEC

Typ av produkt: Sjukvårdstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Produkten överensstämmer med harmoniserade standarder, andra standarder och tekniska specifikationer angivna nedan:

- LVFS 2003:11 “Tillämpliga krav i lagen om medicintekniska produkter”
- LVFS 2009:18 “Ändringar i LVFS:11”

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten följer bestämmelserna i de direktiv som anges ovan.

Edane 14.02.03



Stefan Höiseth

Verkställande direktör

7. Försäkran om överensstämmelse

Benstativ Åke Art nr 1028

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Infusionsstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 14.02.03



Stefan Höiseth

Verkställande direktör