


3. Monteringsanvisning

Stickstativ Charlie Art nr 1032

Uppackning

Stativet levereras i 7 delar med basstolpen komplett monterad med T-spårsfästen, hjulen monterade på foten samt avlastningsbricka, avlastningskorg, tillbehörskorg, hållare för riskavfallsburk och hållare för avfallspåse.

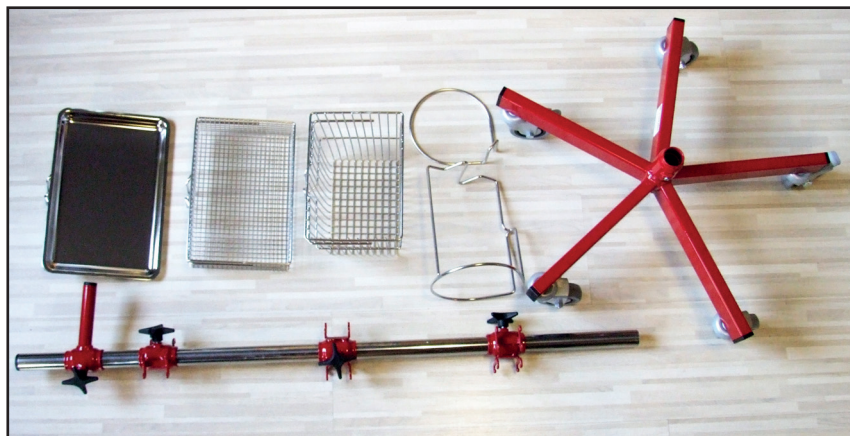

Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten.
OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant. Dra åt insexskruven med medföljande nyckel.



Steg 2

Ställ stativet upp och montera hållare, korgar och bricka genom att sätta ner deras fästbygel i T-spårsfästena.

Klart!



4 Anvisningar för handhavande

Stickstativ Charlie Art nr 1032

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1032 är ett stativ som är avsett att ge en praktisk arbetsmiljö vid vård av, och provtagning på, sängliggande patienter.

- **Förflyttning**

Vid förflyttning bör man hålla i styrhandtaget.


Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastningar

Varje korg, bricka och hållare får belastas med max 1 kg.

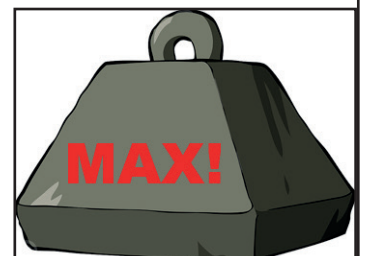

4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Stickstativ Charlie Art nr 1032

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast på foten.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.
- **Rengöring**
Stativets lackerade delar bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.
Korgar, hållare och bricka kan maskindiskas.

