


3. Monteringsanvisning, sid 1

Specialstativ Selim Art nr 1036


Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar. Hjulen är monterade på foten.

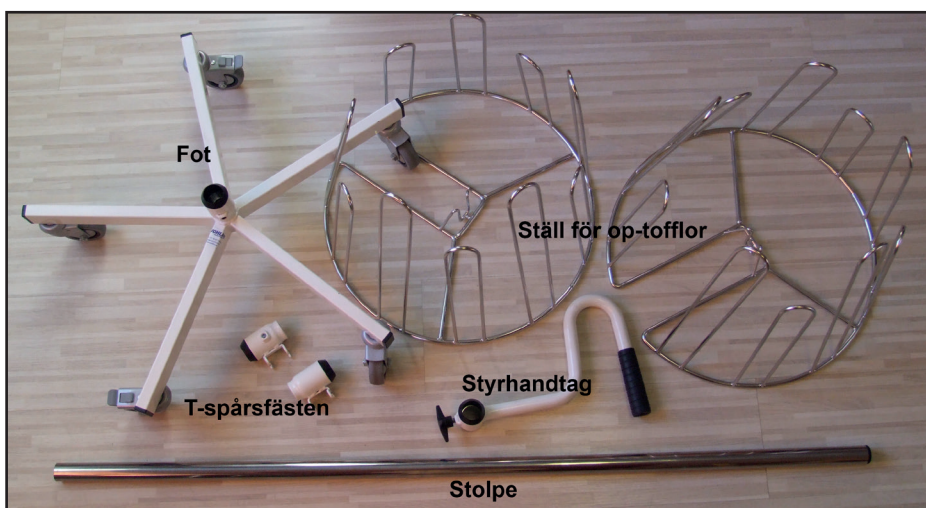

Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten. OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant. Dra åt insexskruven med medföljande nyckel.

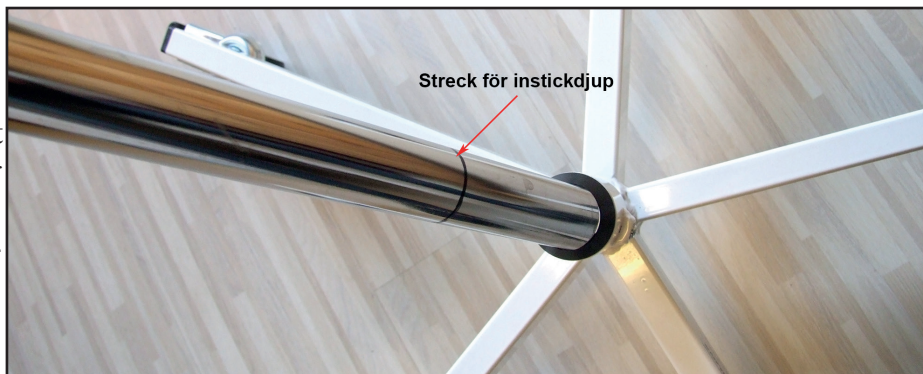

Steg 2




Trä på nedre T-spårsfästet på stolpen.

Steg 3

Trä på styrhandtaget på stolpen.

Steg 4

Trä på övre T-spårsfästet på stolpen.

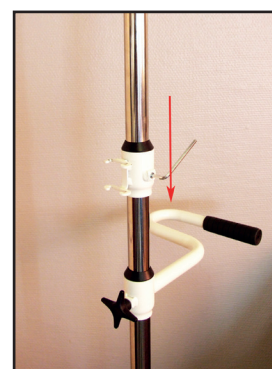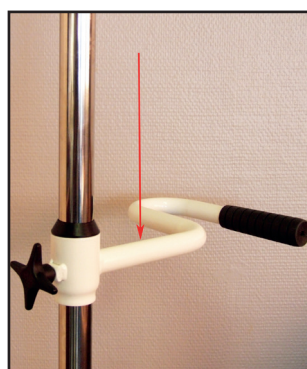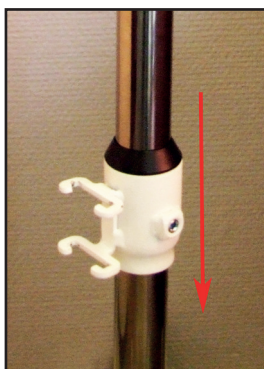

3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)

Specialstativ Selim Art nr 1036

Steg 4

Sätt ner ställen i T-spårsfästena och justera höjden för dem och styrhandtaget.

Klart!



4 Anvisningar för handhavande

Specialstativ Selim Art nr 1036

4.1 Användning:

- **Användningsområde**
Artikel nr 1036 är ett stativ som är avsett för upphängning av använda operationstoffsor.
- **Förflyttning**
Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.
- **Överflyttning till diskmaskin**
Lyft av ställen med tofflorna på och ställ in dem i diskmaskinen.
- **Låsning**
Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastning

N/A



4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Specialstativ Selim Art nr 1036

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
- **Rengöring**
Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

