


### 3. Monteringsanvisning

#### Apparatstativ Louise Art nr 1009


#### Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

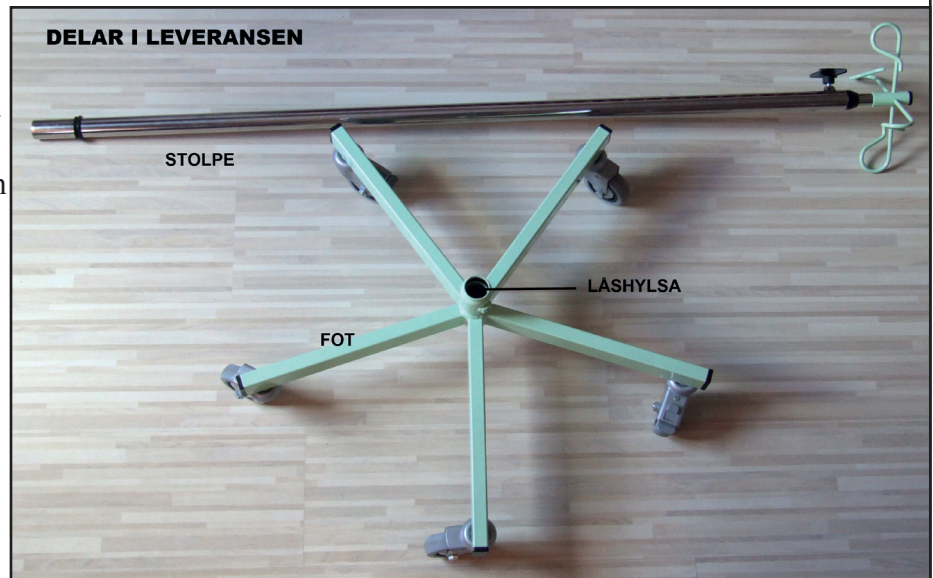

#### Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten. OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

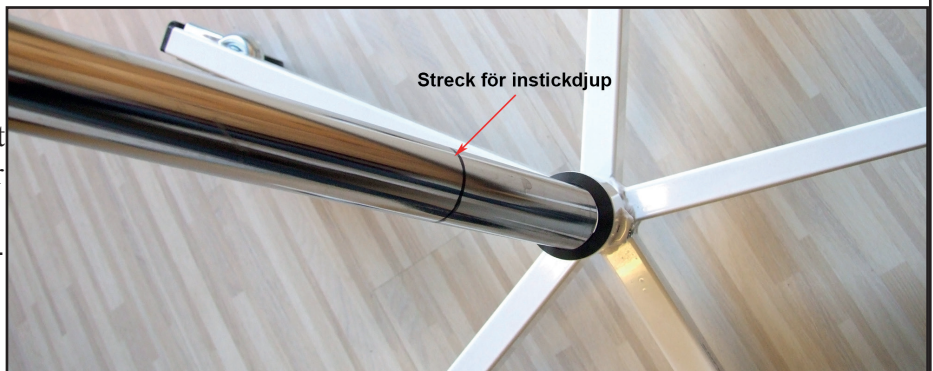

#### Steg 2

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel. Avlägsna den transparenta tejen.



**Klart!**

## 4 Anvisningar för handhavande

### Apparatstativ Louise Art nr 1009

#### 4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1009 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/-flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets stolpe, börja bestyckningen nerifrån med tyngsta enheten längst ner.

- **Höjjustering**

Håll i övre stången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.


- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

#### 4.2 Max belastningar

Apparater på stolpe: 15 kg

Påsar / flaskor på krona: 3 kg

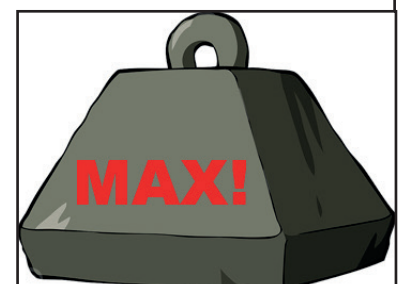

## 4 Anvisningar för handhavande (forts.)

### Apparatstativ Louise Art nr 1009

#### 4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
  - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
  - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
  - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
  - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
  - Kontrollera låsningen för höjdjustering av droppstången
- **Rengöring**
  - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

