


### 3. Monteringsanvisning, sid 1

#### Apparatstativ Ida Art nr 1011


#### Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar. Krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten. Övriga delar lösa för eget montage.

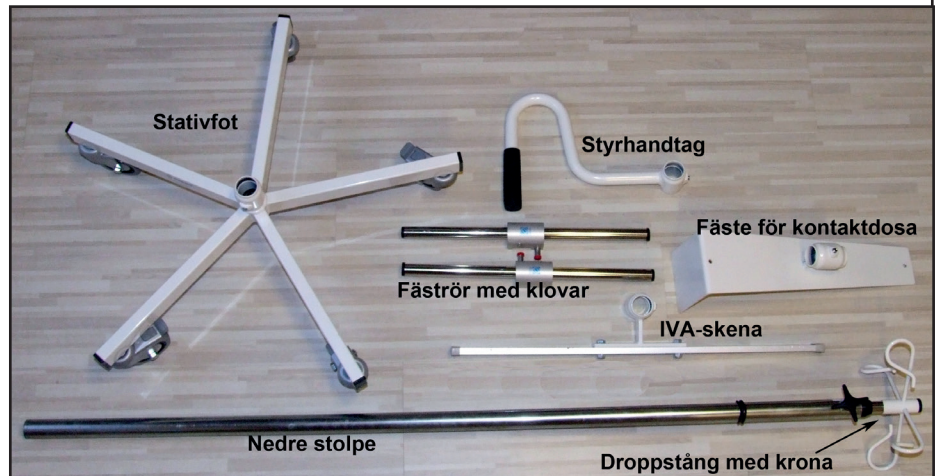


#### Steg 1

Montera IVA-skenan på nedre stolpen genom att dess låshylsa träs på nerifrån. Förflytta den relativt högt upp på stolpen. IVA-skenans fasade kant ska vändas uppåt.

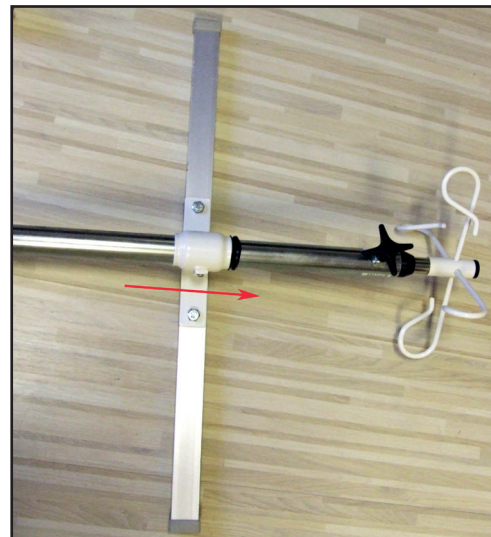

#### Steg 2

Trä därefter på styrhandtaget.

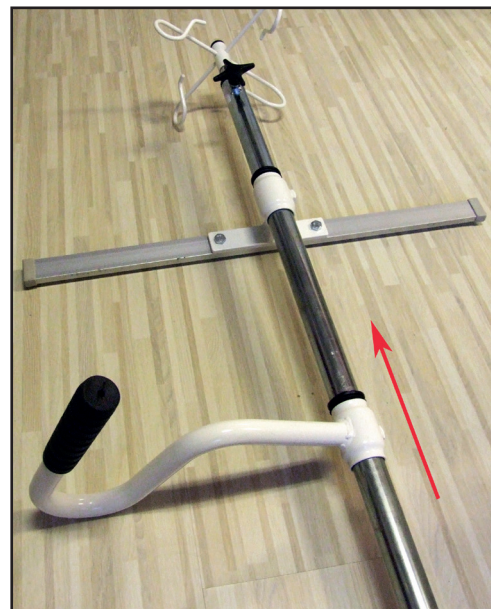


### 3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)

#### Apparatstativ Ida Art nr 1011

##### Steg 3


Trä på hållaren för kontakt-dosa. Observera att fästets “tak” ska vändas uppåt.

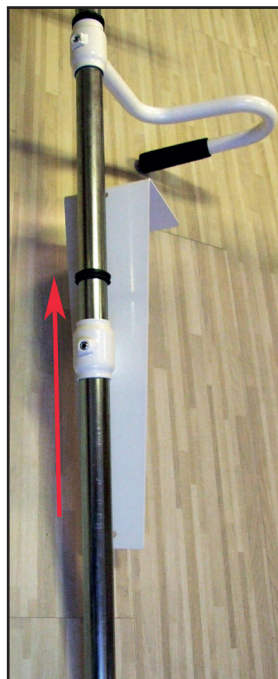

##### Steg 4

Sätt ner stolpen i stativfoten.  
OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

Dra åt skruven med den medföljande insexnyckeln.

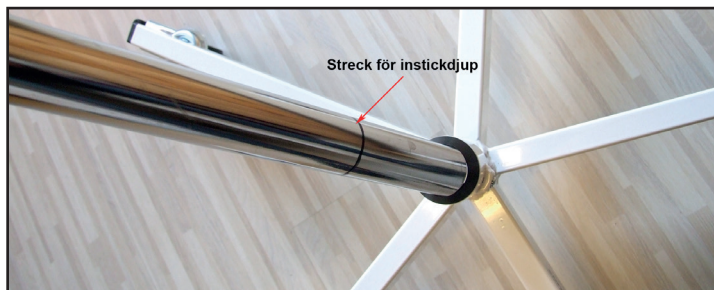

##### Steg 5

Justera höjderna på IVA-skena, styrhandtag och kontaktdose-fäste och dra åt fästhylsorna för respektive del.

**Klart!**



## 4 Anvisningar för handhavande

### Apparatstativ Ida Art nr 1011

#### 4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1011 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/-flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets fäströr/IVA-skena. Börja så nära mittstolpen som möjligt. Vid flera än en pump, tänk på att fördela dem på båda sidor om stolpen.

- **Höjjustering droppstång**

Håll i övre stången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.


- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

#### 4.2 Max belastningar

Apparater på fäströr: 12 kg

Påsar / flaskor på krona: 3 kg

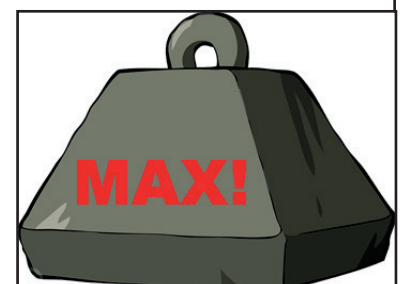

## 4 Anvisningar för handhavande (forts.)

### Apparatstativ Ida Art nr 1011

#### 4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
  - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
  - Kontrollera att fästhylsan för IVA-skenan är åtdragen.
  - Kontrollera att fästhylsan för kontaktdosefästet är åtdragen.
  - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
  - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
  - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
  - Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången
- **Rengöring**
  - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

