

3. Monteringsanvisning

Apparatstativ Sara Art nr 1012


Uppackning

Stativet levereras i 2 delar med krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.



Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten. OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

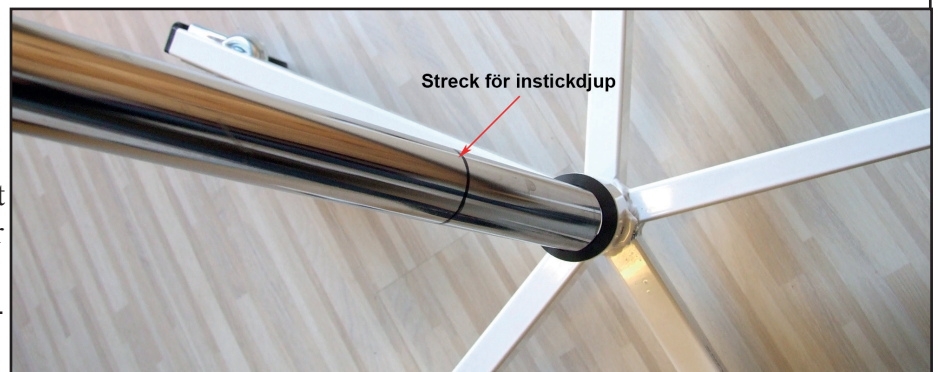

Steg 2

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel.



Klart!

4 Anvisningar för handhavande

Apparatstativ Sara Art nr 1012

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1012 är ett stativ som är avsett att bära rackmonterade pumpar och droppåsar/- flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpracken på stativets nedre stolpe vänd mot stativfotens längsta ben.

- **Höjdjustering**

Håll i övre stängen och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastningar

Apparater på stolpe: 20 kg

Påsar / flaskor på krona: 3 kg



4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Apparatstativ Sara Art nr 1012

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
 - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
 - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
 - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
 - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
 - Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången
- **Rengöring**
 - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

