


3. Monteringsanvisning

Antimagnetiskt apparatstativ Jenny Art nr 1013


Uppackning

Stativet levereras i 4 delar med krona, droppstång och en tätningssring monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

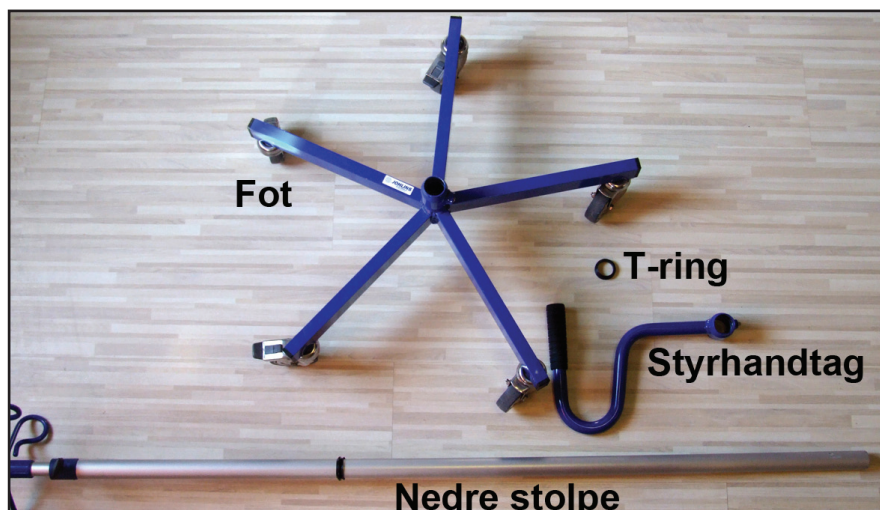


Steg 1

Trä på styrhandtaget på stolpen och för den upp mot tätningssringen. Dra fast låshylsan med den medföljande insexnyckeln.

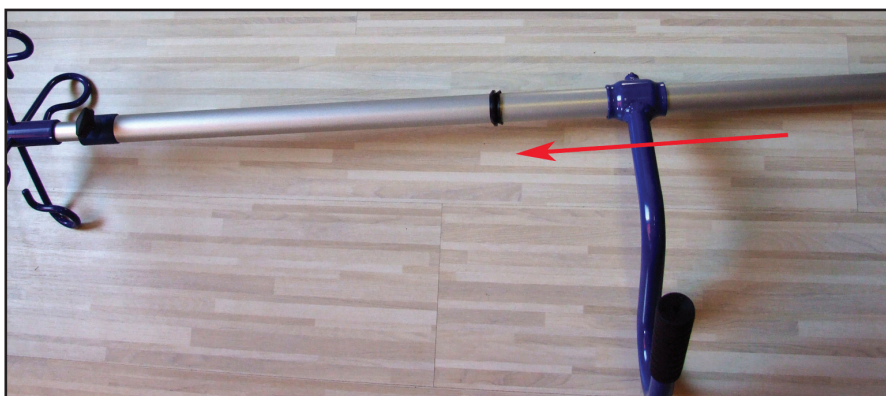

Steg 2

Trä på ytterligare en tätningssring och sätt ner stolpen i fotens låshylsa. Lås fast genom att dra åt låshylsans skruv. Tryck ner tätningssringen mot låshylsan.

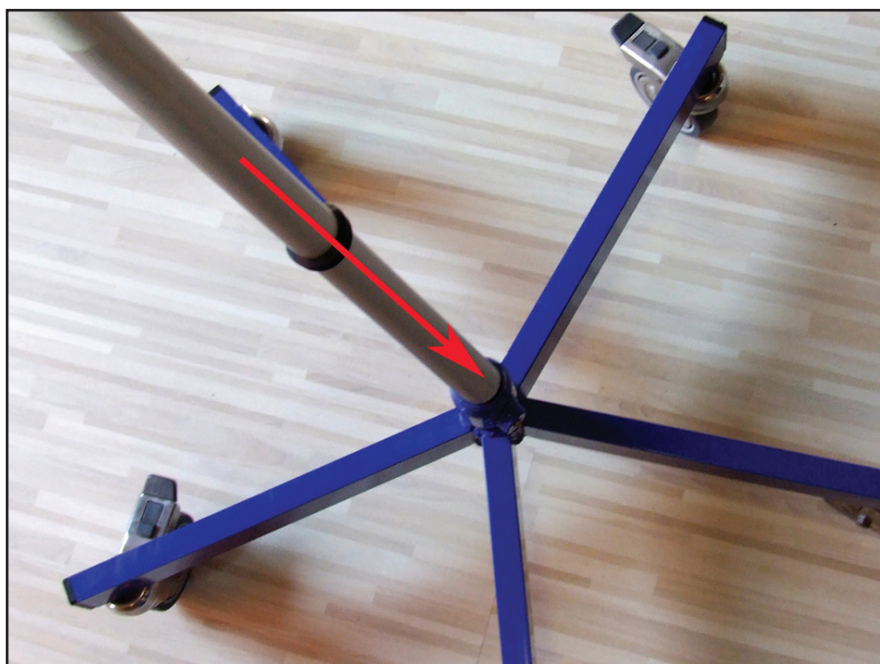

Klart!

4 Anvisningar för handhavande

Antimagnetiskt apparatstativ Jenny Art nr 1013

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1013 är ett stativ avsett för användning i MR-miljö och där kunna bära apparater och droppåsar/-flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets nedre stolpe, börja bestyckningen nerifrån med tyngsta enheten längst ner.

- **Höjdjustering**

Håll i övre stängen och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovasidan av hjulen.

4.2 Max belastningar

Apparater på nedre stolpe: 15 kg

Påsar / flaskor på krona: 3 kg



4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Antimagnetiskt apparatstativ Jenny Art nr 1013

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
 - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
 - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
 - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
 - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
 - Kontrollera låsningen för höjdjustering av droppstången
- **Rengöring**
 - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



7. Försäkran om överensstämmelse

Antimagnetiskt apparatstativ Jenny Art nr 1013

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Infusionsstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- **LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”**
- **Lag (1993:584) om medicintekniska produkter**

Edane 14.02.03



Stefan Höiseth

Verkställande direktör