

### 3. Monteringsanvisning


#### Apparatstativ Elvira Art nr 1019

**Varning!**

Rör inte korsvredet för höjdjusteringen förrän hela stativet är färdigmonterat.

#### Uppackning

Stativet levereras i 3 delar med droppstång monterad på stolpen samt med hjulen monterade på foten.

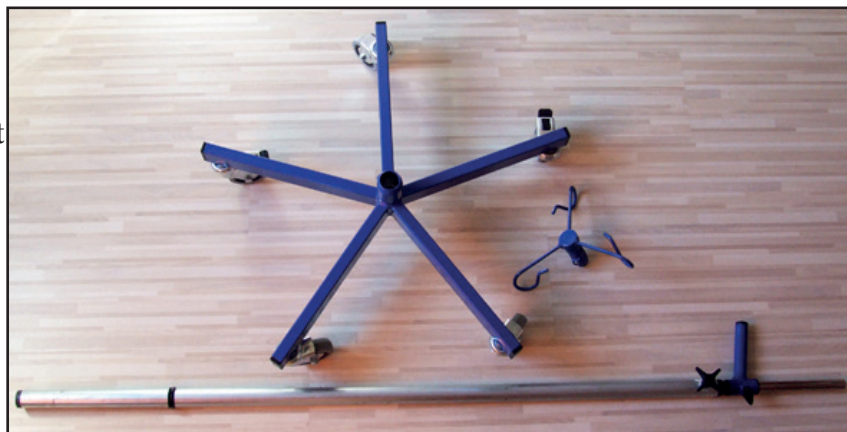


#### Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten.

OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

Dra åt skruven med den medföljande insexnyckeln.

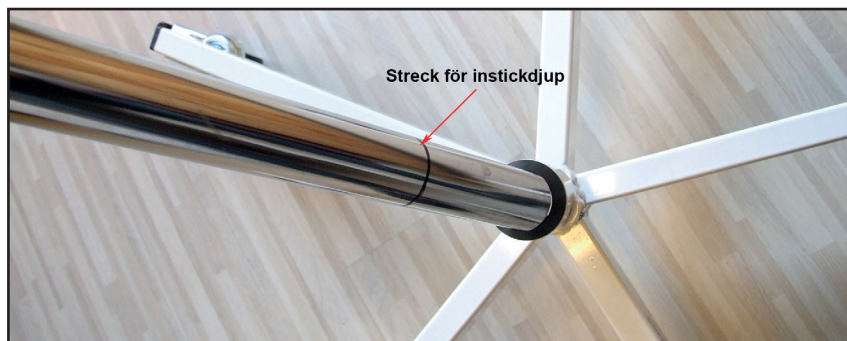

#### Steg 2

Montera kronan längst upp på droppstången med medföljande insexnyckel.



**Klart!**

## 4 Anvisningar för handhavande

### Apparatstativ Elvira Art nr 1019

#### 4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1010 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/  
- flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets stolpe, börja bestyckningen nerifrån med tyngsta enheten längst ner.

- **Höjjustering**

Droppstången höjer sig automatiskt när korsvredet öppnas p.g.a. den inbyggda gasfjädern. Om droppstången bär maxbelastning kan man behöva "hjälpa till" vid höjningen. Vid sänkning får man ta tag i handtaget och dra ner droppstången.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

#### 4.2 Max belastningar

**Apparater på stolpe: 15 kg**

**Påsar / flaskor på krona: 9 kg**



## 4 Anvisningar för handhavande (forts.)

### Apparatstativ Elvira Art nr 1019

#### 4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
  - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
  - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast.
  - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
  - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.
  - Kontrollera att gasfjädern fungerar som avsett.
  - Kontrollera låsningen för höjdjustering av droppstången.
- **Rengöring**
  - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

