
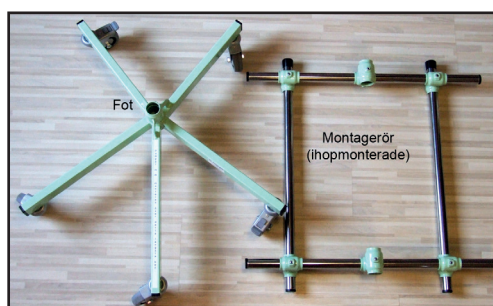


3. Monteringsanvisning, sid 1

Apparatstativ Elsa Art nr 1020


Uppackning

Stativet levereras i 2 förpackningar. Krona och droppstång monterade på stolpen samt med hjulen monterade på foten. Montagerören är ihopmonterade. Övriga delar lösa för eget montage.

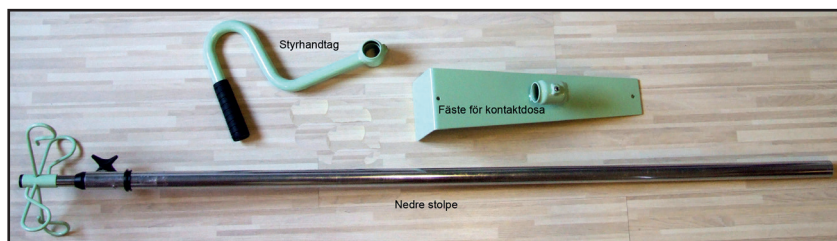


Steg 1

Montera ramen med montagerör genom att dess övre låshylsa träs på nedre stolpen nerifrån.

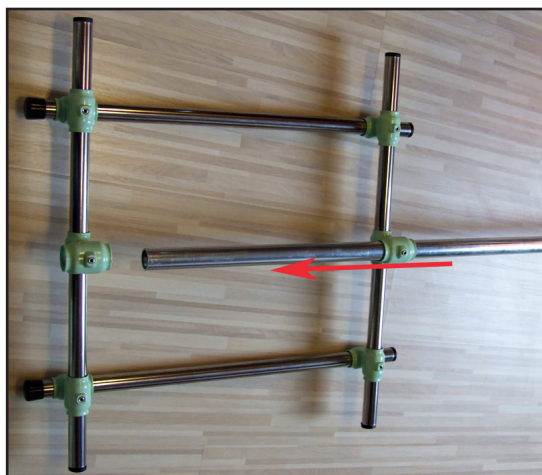

Steg 2

Trä därefter på styrhandtaget.

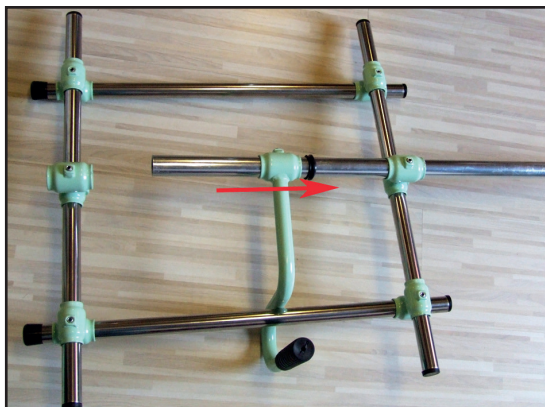


3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)

Apparatstativ Elsa Art nr 1020

Steg 3

Fixera komponenterna på stolpen i preliminärt läge genom att dra åt låshylsorna med den medföljande insexnyckeln.

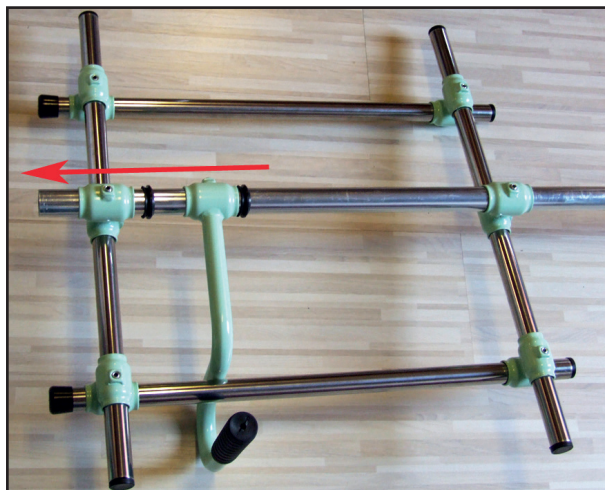


Steg 4

Trä på fästplattan på stolpen och fixera även denna i ett preliminärt läge. Observera att fästplattans "tak" ska sitta uppåt.



Steg 5

Sätt ner stolpen i stativfoten. OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

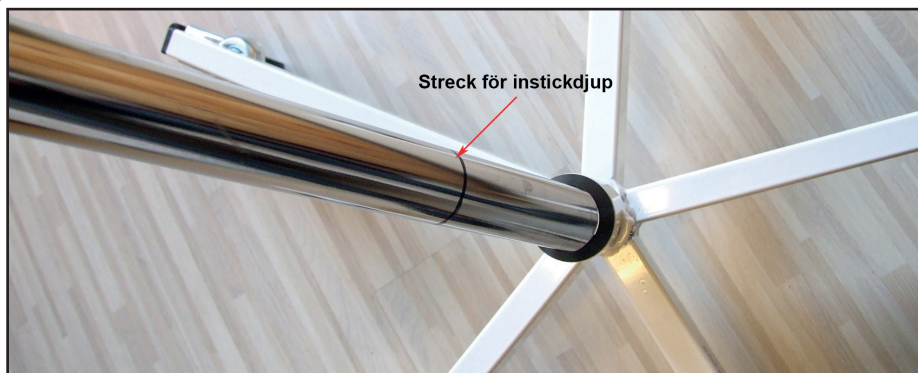

Steg 6

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel.

Steg 7

Justera höjderna på monterör, styrhandtag och kontaktdosefäste och dra åt fästhylsorna för respektive del.

Klart!

4 Anvisningar för handhavande

Apparatstativ Elsa Art nr 1020

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1020 är ett stativ som är avsett att bära apparater och droppåsar/-flaskor.

- **Bestyckning**

Montera pumpar och andra typer av apparater på stativets montererör. Vid flera än en pump, tänk på att fördela dem på båda sidor om stolpen. Observera att apparaterna ska vändas emot stativfotens längsta ben.

- **Höjdjustering droppstång**

Håll i övre stången och öppna korsvredet när du vill justera höjden, lås därefter med korsvredet.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.


- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastningar

Apparater på fäströr: 20 kg

Påsar / flaskor på krona: 3 kg

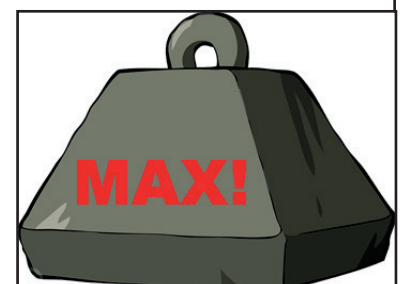

4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Apparatstativ Elsa Art nr 1020

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
 - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
 - Kontrollera att fästhylsorna för monterören är åtdragna.
 - Kontrollera att fästhylsan för kontaktdosefästet är åtdragen.
 - Kontrollera att krokar för droppåsar sitter fast
 - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
 - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
 - Kontrollera låsningen för höjjustering av droppstången
- **Rengöring**
 - Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.

