


3. Monteringsanvisning

Displaystativ Mathias Art nr 1022

Uppackning

Stativet levereras i 3 delar.
En nedre stolpe, en övre stolpe med vesa-fäste och en fot med hjulen monterade.

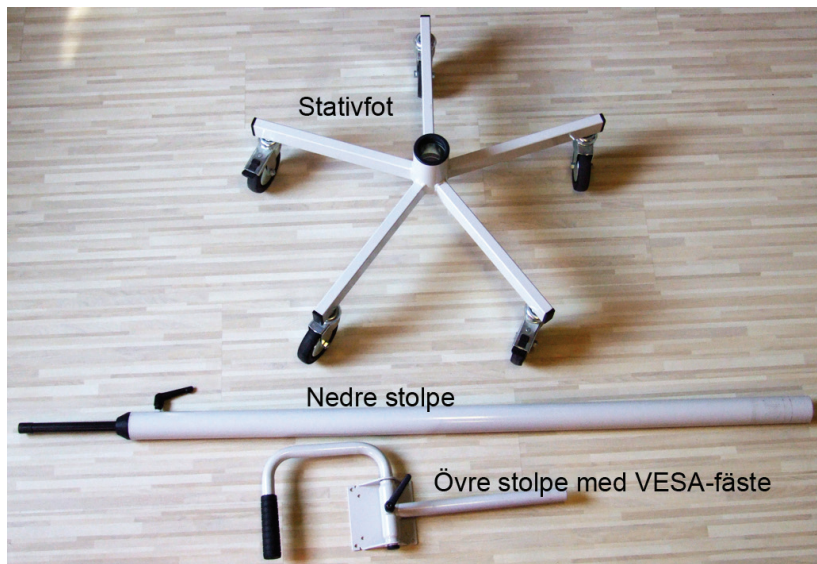

Steg 1

Sätt stolpen i fotens låshylsa och dra åt låsskruven med den medföljande insexnyckeln.



Steg 2

Sätt ner övre stolpen över änden på gasfjädern och tryck ner i den nedre stolpen.

OBS! Spaken måste vara i öppet läge för att man ska kunna få ner övre stolpen. När övre stolpen är på plats dras spaken till så att den låser.



Klart!

4 Anvisningar för handhavande

Displaystativ Mathias Art nr 1022

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1022 är ett stativ som är avsett att användas för displayskärmar av olika slag. Displaystativet medger stor flexibilitet när det gäller placering och inställning av siktinkel.

Det kan bestyckas med olika typer av video- och dataskärmar som passar i VESA-fästen. Tillbehör finns för montage av extra utrustning som t.ex. nätenhet, kontaktdon, etc.

- **Bestyckning**

Fästplattan för bildkärm passar till både VESA 75 och VESA 100

- **Höjdjustering**

Höjden justeras med hjälp av höjdjusteringsspaken för övre stolpe. Observera att det sitter gasfjädrar i den nedre stolpen för att underlätta höjdjusteringen.

- **Justering av bildskärmsvinkel**

Önskad vinkel ställs in med tilthandtaget. Låsning görs med justeringsspak för tiltning.

- **Låsning**



Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning. Tänk även på att stativets droppstång kan behöva sänkas för att kunna passera genom en dörröppning.

4.2 Max belastning

VESA-fäste: 14 kg

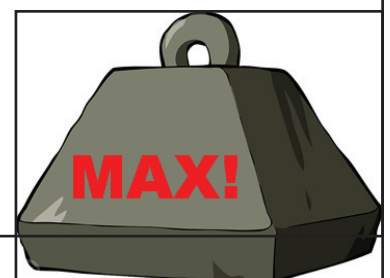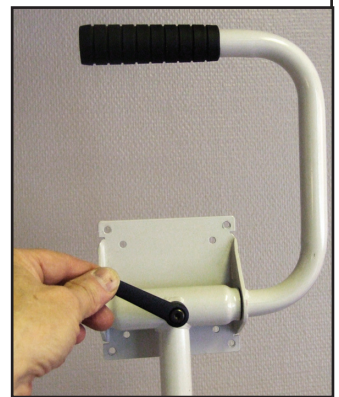

4 Anvisningar för handhavande, sid. 3

Displaystativ Mathias Art nr 1022

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
 - Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
 - Kontrollera gasfjädersn funktion.
 - Kontrollera att låsning för höjdjustering och tiltning fungerar.
 - Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
 - Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen.
- **Rengöring**
 - Stativet bör rengöras regelbundet.



7. Försäkran om överensstämmelse

Displaystativ Mathias Art nr 1022

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Infusionsstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
 Movägen 13
 671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- **LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”**
- **Lag (1993:584) om medicintekniska produkter**

Edane 14.02.03



Stefan Höiseth

Verkställande direktör