


3. Monteringsanvisning, sid 1

Specialstativ Tobias Art nr 1037

Uppackning

Stativet levereras i 1 förpackning.
Hjulen är monterade på foten.
T-spårsfästen och styrhandtag
är monterade på stolpen.

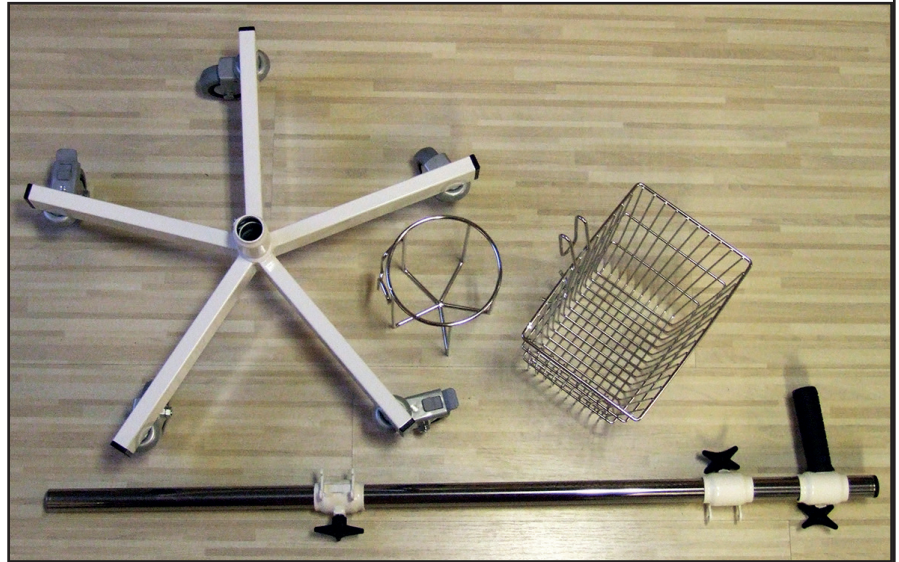

Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten.
Dra åt skruven med medföljande insexnyckel.



3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)

Specialstativ Tobias Art nr 1037

Steg 2

Sätt i gasflaskehållaren och avlastningskorgen i T-spårsfästena och justera höjden på dem.

Klart!



4 Anvisningar för handhavande

Specialstativ Tobias Art nr 1037

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1037 är ett stativ som är avsett för returtransport av syrgasflaska och övervakningsutrustning efter uppvakning.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastning

N/A



7. Försäkran om överensstämmelse

Specialstativ Tobias Art nr 1037

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Infusionsstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 16.11.10



Stefan Höiseth

Verkställande direktör

8. Kontaktuppgifter

**Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane
Sweden**

Tel: 0570 501 20

Fax: 0570 501 43

E-post: info@johlins.se

Webb: www.johlins.se