


3. Monteringsanvisning, sid 1

Specialstativ Kaj Art nr 1040


Uppackning

Stativet levereras i 1 förpackning.
Hjulen är monterade på foten.
T-spårsfästet är monterat på stolpen.

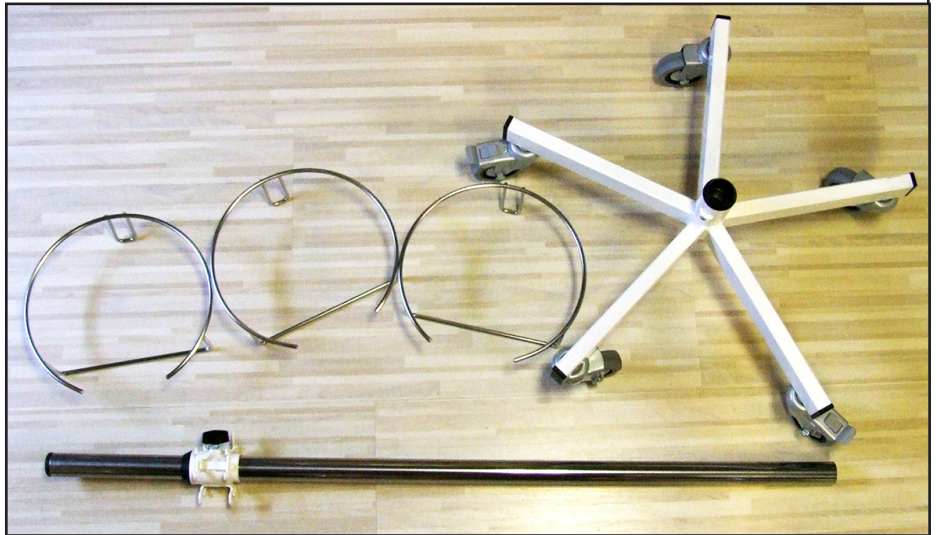

Steg 1

Sätt ner stolpen i stativfoten.
OBS! Det är viktigt att stolpen kommer tillräckligt djupt i fotens låshylsa. Därför finns ett streck på stolpen som markerar insticksdjupet. Stolpen ska ner i fothylsan så att strecket hamnar i jämnhöjd med tätningens överkant.

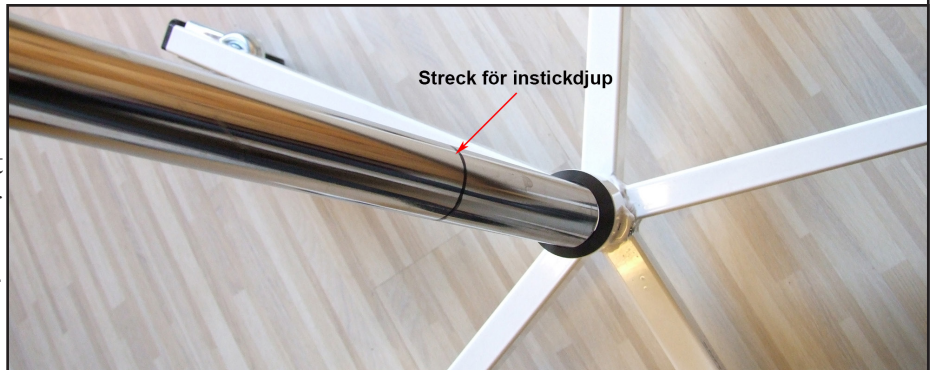

Steg 2

Lås fast stolpen på foten genom att dra åt låshylsans skruv med medföljande insexnyckel. Avlägsna den transparenta tejpens.




3. Monteringsanvisning, sid 2 (forts)

Specialstativ Kaj Art nr 1040

Steg 3

Sätt brickhållarna i T-spårsfästena och justera ev. höjden på dem.

Klart!

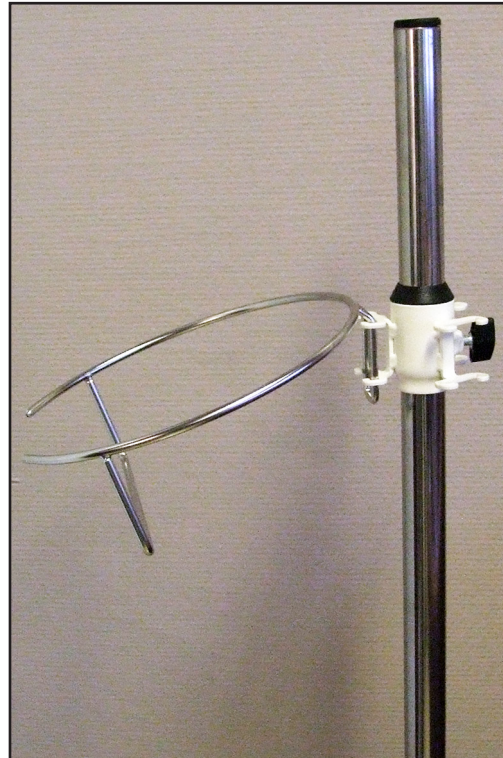

4 Anvisningar för handhavande

Specialstativ Kaj Art nr 1040

4.1 Användning:

- **Användningsområde**

Artikel nr 1040 används för uppsamling av förbrukade kompresser i därför avsedda plastbrickor.

- **Förflyttning**

Vid dörrtrösklar och hissar - drag stativet efter dig för att undvika risk för tippning.

- **Låsning**

Stativet har två låsbara hjul som låses resp. låses upp med en spärr på ovansidan av hjulen.

4.2 Max belastning

N/A



4 Anvisningar för handhavande (forts.)

Specialstativ Kaj Art nr 1040

4.3 Underhåll

- **Funktionskontroll (minst en gång per år)**
Kontrollera att stolpen sitter ordentligt fast i foten och inte glappar i låshylsan.
Kontrollera att hjulen roterar och svänger som de ska.
Kontrollera låsfunktion på de låsbara hjulen
- **Rengöring**
Stativet bör rengöras regelbundet med antiseptiskt medel.



7. Försäkran om överensstämmelse

Specialstativ Kaj Art nr 1040

EG-försäkran om överensstämmelse

Typ av produkt: Sjukvårdstativ
Fabrikat: Johlins Sweden AB
Varumärke: Johlins

Tillverkare: Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane

Som tillverkare försäkrar vi under eget ansvar att produkten överensstämmer med följande föreskrifter och lagar:

- LVFS 2003:11 “Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter”
- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Edane 17.12.07



Stefan Höiseth

Verkställande direktör

8. Kontaktuppgifter

**Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane
Sweden**

Tel: 0570 501 20

Fax: 0570 501 43

E-post: info@johlins.se

Webb: www.johlins.se